

NAWA[®] Medical Wundspray ist ein Spray für die Befeuchtung, Reinigung und Heilung von akuten Wunden.

Eigenschaften:

NAWA[®] MEDICAL Wundspray dient zur Befeuchtung, Reinigung von akuten Wunden und unterstützt die Wundheilung (Vorbeugung von Infektionen durch erniedrigten pH- Wert).

- a. Befeuchtung akuter Wunden
- b. Reinigt das betroffene Gebiet
- c. Reduziert die Schwellung
- d. Reduziert die Blutung
- e. Fördert die Wundheilung
- f. Beugt Infektionen vor
- g. Für Kinder und sensible Haut geeignet
- h. Beugt Narbenbildung vor*

*wenn das Wundgebiet mit einem Verband abgedeckt **und** mit NAWA[®] MEDICAL Wundspray feucht gehalten wird, bis die Wunde geschlossen ist

Indikation:

Zur Akut- und Erstversorgung bei kleinen, offenen Verletzungen (z. B. Schnitt-, Schürf, Risswunden) und Verbrennungen 1. und 2. Grades.

Anwendung:

Wunde mit **NAWA[®] MEDICAL Wundspray** reinigen und befeuchten. Direkt auf das Wundgebiet sprühen und bei Bedarf mehrmals wiederholen. **NAWA[®] MEDICAL Wundspray** kann in Verbindung mit einem handelsüblichen Verbandstoff angewendet werden. Wenn möglich, Wundgebiet mit Verband abdecken und mit **NAWA[®] MEDICAL Wundspray** feucht halten, bis die Wunde geschlossen ist. Darauf achten, dass der Verband nicht mit der Wunde verklebt. Wir empfehlen eine Weiterbehandlung ab dem 3. Tag mit **NAWA[®] MEDICAL Elektrolyt-Salbe S**. Für eine kühlende Wirkung **NAWA[®] MEDICAL Wundspray** im Kühlschrank aufbewahren. Kann auch im Mund- und Schleimhautbereich angewendet werden. Die Überkopfsprayette ermöglicht gleichmäßiges Sprühen aus jeder Position. Dopingfrei und für Kinder geeignet. Die Anwendungsdauer richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

Kontraindikationen:

Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Bei Verbrennungen ab Grad 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Die Anwendung bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kleinkindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen

Gewebeverträglichkeit und Biokompatibilität:

NAWA[®] MEDICAL Wundspray enthält keine hautreizenden Substanzen. Es ist nicht zytotoxisch, nicht irritierend; nicht sensibilisierend.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Auf hygienische Entnahme achten. Nach Gebrauch verschließen. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Temperaturbegrenzung beachten. Gebrauchsanweisung beachten. Trocken aufbewahren.

Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellung

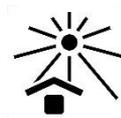
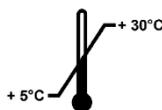
Aufbrauchfrist: 6 Monate nach Anbruch der Flasche

Packungsgrößen: 50 ml

Chargenbezeichnung/  : auf Flaschenboden aufgedruckt

Verfalldatum/  : auf Flaschenboden aufgedruckt

Zusammensetzung (INCI): Aqua purificata, Trace Elements (Zinc, Iron)

CE 0197

NAWA HEILMITTEL GmbH
Ostendstrasse 100, D-90482 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911-544 41-0
Telefax: +49 (0) 911-544 41-11
E-Mail: info@nawa.com

REV 032021
Made in Germany